

PORTA FILTRO INFAXPAPER

Registro Anvisa: 80906620002

TAMANHOS:

FD1 - PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 27MM X 29,5MM – CINZA
(*Similar MultSpiro*)

FD2 – PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 26,5MM X 30,5MM – BRANCO
(*Similar Cosmed/ Microquark Adulto / Pony Fx*)

FD3 – PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30MM X 33,5MM – LARANJA
(*Similar MIR / Spirobank / Mini Spir / Spirolab/ Spiro USB Tamussino*).

FD4 – PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30MM X 34MM – MARFIM
(*Similar Microlab/ Spida/ Microplus/ Micromedical/ Vitalograph/ Contec/ D/ML – 3300*).

FD5 – PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 45,3MM X 48,3MM – VERDE
(*Similar KOKO*)

FD6 – PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 25,5MM X 28MM – LILÁS
(*Similar Sibelmed*)

FD7- PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 29MM X 34MM – AZUL
(*Similar Spiro Spectrum (Neurosoft) / Jaeger / Masterscope / Vmax / MasterScreen IOS/ Microcard/ Vyair MasterScreen IOS*).

FD8 –PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 30,4MM x 32MM - VERDE CLARO
(*Similar Geratherm/ Vitatrace VT 130*)

FD9 – PORTA FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA 32,5MM X 36,4MM – AZUL CLARO
(*Similar NEUMOFILT/ Plestimografia*).



CONTEÚDO: Caixa com 20 / 30 ou 50 unidades.

COMPOSIÇÃO: Poliestireno

**Produto não acompanha o Elemento Filtrante que deve ser comprado separadamente.*

O PORTA FILTRO PARA ESPIROMETRIA INFAXPAPER é utilizado em conjunto com o elemento filtrante em exames para avaliação da atividade pulmonar (Espirometria). Ele

Infaxpaper Bobinas e Bocais

CNPJ 11.336.271/0001-39 Insc. Estadual 90502467-17

Rua João Dalegrave,343 Bacacheri – Curitiba – PR CEP 82.520-660 Telefone: (41) 3263-2763/ (41) 9 8803-6250

Email: vendas@infixpaper.com.br Site: www.infixpaper.com.br

impede que contaminantes físicos sejam carregados pela tubulação do espirômetro, evitando que essas partículas cheguem ao sensor de fluxo e aos circuitos internos. Além disso, o porta filtro minimiza a turbulência do fluxo do ar no ato do exame de espirometria ou na análise total do pulmão.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Retirar o produto da embalagem;
- Inserir o Elemento Filtrante e fechar o produto;
- Conectar o filtro ao aparelho de espirometria;
- Proceder com o exame;
- Descartar o elemento filtrante após o uso;
- Fazer assepsia no porta filtro para posterior reutilização

PROCEDIMENTOS PARA MANTER A HIGIENE DO PORTA FILTRO:

- Retirar o elemento filtrante que esteja dentro do porta filtro, utilize uma solução de água destilada e detergente neutro (coloque em um copo de 200 ML uma solução de água destilada e uma colher de sopa de detergente neutro), mergulhe e deixe o suporte nesta solução por um período de 20 a 30 minutos.
- Logo após, enxágue em água corrente.
- Ao retirar dessa solução mergulhe o suporte em uma solução germicida diluída em água destilada, em uma concentração a 2% (98% água e 2% germicida) por um período de 20 a 30 minutos.
- Enxágue em água corrente e deixe secar sobre um papel toalha.
- O elemento filtrante deve ser trocado a cada paciente.

PRECAUÇÕES DE USO:

A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendada pelo médico. Somente utilizar o produto se o mesmo estiver íntegro e dentro do prazo de validade. O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso. Sugere-se que seja utilizado por profissional devidamente habilitado.

CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danificação na embalagem e no produto. O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até 40º Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS

Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL.



Juliano Lindenberg Cordeiro
Responsável Técnico
CRF/PR 21594

Infaxpaper Bobinas e Bocais

CNPJ 11.336.271/0001-39 Insc. Estadual 90502467-17

Rua João Dalegrave,343 Bacacheri – Curitiba – PR CEP 82.520-660 Telefone: (41) 3263-2763/ (41) 9 8803-6250

Email: vendas@infaxpaper.com.br Site: www.infaxpaper.com.br