

## **ELEMENTO FILTRANTE INFAXPAPER**

**Registro Anvisa: 80906620002**



**CONTEÚDO EMBALAGEM:** 50 unidades.

**COMPOSIÇÃO:** Tecido-não-tecido

### **Instruções de uso:**

- Retirar o produto da embalagem;
- Inserir no porta filtro e fechar o mesmo;
- Conectar o porta filtro no espirômetro;
- Proceder com o exame;
- Descartar o elemento filtrante após o uso;

### **ATENÇÃO**

- **O elemento filtrante deve ser trocado a cada paciente.**

**PRECAUÇÕES DE USO:**

A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendado pelo médico.  
Somente utilizar o produto se o mesmo estiver íntegro e dentro do prazo de validade.  
O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso.  
Sugere-se que seja utilizado por profissional devidamente habilitado.

**CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:**

No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danificação na embalagem e no produto.  
O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até 40° Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

**PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS**

**Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL**

**Juliano Lindenberg Cordeiro**  
**Responsável Técnico**  
**CRF/PR 21594**