

FILTRO DESCARÁVEL INFAXPAPER

Registro Anvisa: 80906620001

TAMANHOS:

26.3mm X 30 mm

26 mm X 31 mm

29 mm X 34 mm

30 mm X 33.5mm

30 mm X 34 mm

40 mm X 43.5mm

45 mm X 48.5mm



CONTEÚDO EMBALAGEM: 50 ou 100 unidades.

COMPOSIÇÃO: Corpo: Polipropileno e o Elemento filtrante: Tecido-não-tecido.

O **FILTRO DESCARTÁVEL PARA ESPIROMETRIA INFAXPAPER** é utilizado em exames para avaliação da atividade pulmonar (Espirometria). Ele impede que contaminantes físicos sejam carregados pela tubulação do espirômetro, evitando que essas partículas cheguem ao sensor de fluxo e aos circuitos internos. Além disso, o filtro minimiza a turbulência do fluxo do ar no ato do exame de espirometria ou na análise total do pulmão.

Instruções de uso:

- Retirar o produto da embalagem;
- Conectar o filtro ao aparelho de espirometria;
- Proceder com o exame;
- Descartar o filtro após o uso;

PRECAUÇÕES DE USO:

A indicação quanto ao uso do produto deve ser recomendado pelo médico.

Somente utilizar o produto se o mesmo estiver íntegro e dentro do prazo de validade.

O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso. Sugere-se que seja utilizado por profissional devidamente habilitado.

CUIDADOS ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

No transporte e manuseio do produto, tomar as devidas precauções, para que não ocorra danificação na embalagem e no produto.

O produto deve ser armazenado em local limpo e seco e em temperatura até 40º Celsius e umidade relativa do ar de até 60%.

PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS

Artigo médico hospitalar NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO

Juliano Lindenberg Cordeiro

Responsável Técnico

CRF/PR 21594